

**WICHTIG: bitte beachten Sie die Hinweise in folgenden Verarbeitungsanleitungen:
VITA VM 9 Druck-Nr. 1190, VITA In-Ceram YZ Nr. 1128, Coloring Liquid 1305M**


VITAVM®9

	Progr. Nr.	Vt. °C	→ min.	↗ min.	↗ °C/min	Temp. ca. °C	→ min.	VAC min.
Thermische Vorbehandlung	72	500	0.00	5.00	100	1000	15.00	-
EFFECT BONDER Brand*	61	500	6.00	6.00	80	980	1.00	6.00
EFFECT BONDER Paste*	62	500	6.00	6.00	80	980	2.00	6.00
BASE DENTINE Washbrand**	85	500	2.00	7.27	60	950	1.00	7.27
MARGIN Brand	86	500	6.00	8.21	55	960	1.00	8.21
EFFECT LINER Brand	63	500	6.00	7.49	55	930	1.00	7.49
1. Dentinbrand	64	500	6.00	7.27	55	910	1.00	7.27
2. Dentinbrand	65	500	6.00	7.16	55	900	1.00	7.16
Glanzbrand	66	500	0.00	5.00	80	900	1.00	-
Glanzbrand VITA AKZENT	67	500	4.00	5.00	80	900	1.00	-
Korrekturbrand mit COR	68	500	4.00	4.20	60	760	1.00	4.20

* bei nicht eingefärbten VITA In-Ceram YZ bitte EFFECT BONDER Brand durchführen.
ACHTUNG: bei eingefärbten VITA In-Ceram YZ wird auf diesen Brand verzichtet!

** bei eingefärbten VITA In-Ceram YZ bitte BASE DENTINE Washbrand durchführen.
ACHTUNG: bei nicht eingefärbten VITA In-Ceram YZ wird auf diesen Brand verzichtet!

Bei Dentalkeramiken hängt das Brennergebnis sehr stark von der individuellen Brandführung des Anwenders ab, d.h. unter anderem von der Art des Ofens, der Lage des Temperaturfühlers, dem Brenngutträger sowie der Größe des Werkstückes bei der Brandführung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen für die Brenntemperaturen (unabhängig davon, ob sie mündlich, schriftlich oder im Wege praktischer Anleitungen erteilt werden) beruhen auf zahlreichen eigenen Erfahrungen und Versuchen. Dennoch können diese Angaben nur als Richtwerte für den Anwender angesehen werden. Sollten Oberfläche, Transparenz oder Glanzgrad nicht dem unter optimalen Bedingungen zu erzielenden Brennergebnis entsprechen, ist die Brandführung dahingehend anzupassen. Entscheidend für die Brandführung ist nicht die vom Gerät angezeigte Brenntemperatur, sondern das Aussehen und die Oberflächenbeschaffenheit des Brennguts nach dem Brand.

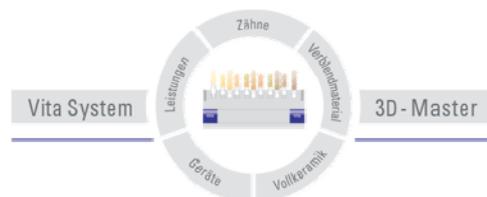

VITA

VITA Zahnfabrik • H. Rauter GmbH & Co.KG •
Spitalgasse 3 • D-79713 Bad Säckingen
www.vita-zahnfabrik.com